

ГАРАНТИЙНЫ ТАЛОН

Наименование изделия: Кресло-каталка для инвалидов Ortonica Base 115

- 1.Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
- 2.При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
- 3.В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи _____

Сервисное обслуживание изделия производится в ООО "Реамед",

Контактный телефон: 8(473) 233-03-32

Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект,11

КРЕСЛО-КАТАЛКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

«Ortonica Base 115»



Паспорт и инструкция пользователя

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Кресло-каталка для инвалидов Ortonica Base 115(далее каталка) предназначена для передвижения людей при помощи сопровождающих лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Размеры, масса и максимальная грузоподъемность каталки должны

соответствовать таблице:

Модель	Ширина сиденья	Ширина каталки	длина	Масса каталки	Макс. нагрузка
Ortonica Base 115	43-51 см	53-61 см	80,6 см	9,5 кг	100 кг

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло-каталка для инвалидов Ortonica Base 1151шт.

Паспорт1шт.

Сумка для транспортировки.....1шт

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При посадке в каталку и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами.

4.2. Во избежание поломки или опрокидывания каталки, запрещается становиться на опоры для ног, если они находятся в горизонтальном положении.

4.3. Запрещается использовать каталку с неисправными тормозами.

4.4. Препятствия (пороги, ступеньки и др.) необходимо преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается толкать каталку на препятствие высотой более 40 мм без подъема передних колес.

5. УСТРОЙСТВО

Рама коляски изготовлена из алюминиевых труб и имеет складную конструкцию.

Каталка оснащена откидными подлокотниками

Ручки оборудованы тормозами для сопровождающего лица со стояночным тормозом

Удобная транспортировочная система складывания спинки

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию кресла-каталки, не ухудшающие ее потребительских свойств.

6. ПОДГОТОВКА КАТАЛКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Каталка складывается и раскладывается без инструмента: для приведения каталки в рабочее состояние необходимо поднять за ручки каталки спинку. И разложить каталку в стороны до полного натяжения сиденья.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

8.3 Срок службы 6 лет.

8.4 Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине.

8.5 Производитель: ZhenJiang Assure Medical Equipment Co. Ltd.

NO.3. factory, Xingdingmao Industry Park, Dingmao Development Zone, Zhenjiang city, Jiangsu Province, China.

Tel: 0086-511-88838555, 0086-511-88896286